

Autopueba rápida CLINITEST de antígenos COVID-19

Instrucciones De Referencia Rápida

Esta prueba es gratuita y distribuida por la Administración de Recursos y Servicios de Salud de los Estados Unidos (HRSA) a través de NEMS para garantizar y ampliar las pruebas gratuitas y accesibles a la comunidad. No está autorizado para su reventa.


*Esta prueba está autorizada para el uso de autodiagnóstico por personas de 12 años de edad o mayores (o muestras recolectadas por adultos de personas de 2 a 13 años de edad).

La Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. ha otorgado una extensión de la vida útil para la autopueba rápida de antígeno COVID-19 CLINITEST® de 11 meses a 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Escanee el CÓDIGO QR para obtener información actualizada.




PASO 1

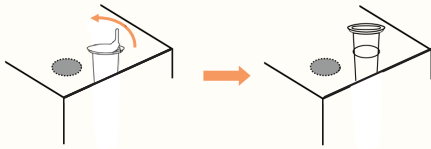

Antes de empezar, lávese las manos. Coloque el tubo en el soporte y retire el sello. Asegúrese de que el tubo esté recto.

PASO 2

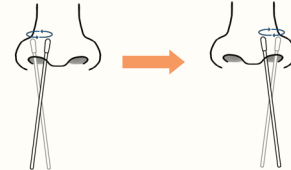


5 círculos

5 círculos

Inserte cuidadosamente la punta del hisopo aproximadamente de 1/2 a 3/4 de pulgada de profundidad en la fosa nasal y complete al menos 5 círculos en **CADA** fosa nasal.


PASO 3

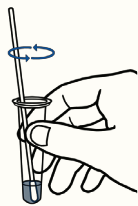

6 círculos

Inserte la punta del hisopo en el tubo y mezcle vigorosamente al menos 6 veces en la parte inferior y lateral del tubo.


PASO 4

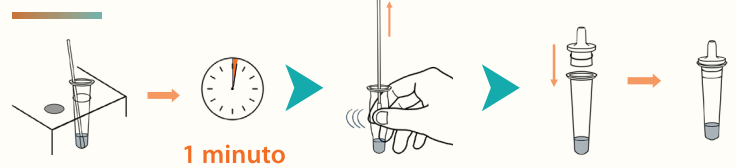

1 minuto

Coloque el tubo en el portatubos. Cronometre 1 minuto. Después de 1 minuto, apriete la punta del hisopo varias veces y retire del tubo. Coloque la punta dosificadora en la parte superior del tubo.

PASO 5

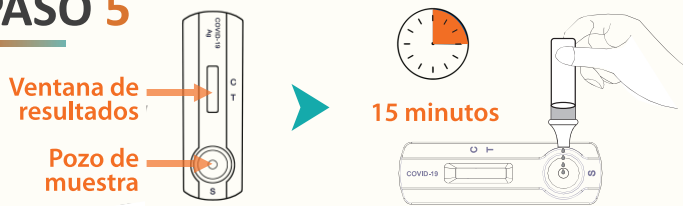

Ventana de resultados

Pozo de muestra


15 minutos

Exprima 4 gotas de solución en el pozo de muestra y comience a cronometrar 15 minutos.

PASO 6 LEA EL RESULTADO DE LA PRUEBA DESPUÉS DE 15 MINUTOS



COVID-19 POSITIVO: Dos líneas rosas/rojas indican un resultado positivo. Notifique inmediatamente a su proveedor de atención médica sobre su resultado positivo para analizar las opciones de tratamiento del COVID-19. Tenga en cuenta que el tratamiento antiviral oral para COVID-19 debe iniciarse dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas.

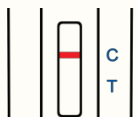

COVID-19 NEGATIVO: No se detectaron proteínas virales de COVID-19. Considere volver a realizar la prueba en 1-2 días si sus síntomas comenzaron hace 3 días.



NO VÁLIDO: Este resultado de la prueba no es válido. Realice una nueva prueba.

NEMS NORTH EAST
MEDICAL SERVICES
東北醫療中心

a californiah^hcenter

www.nems.org/span/
NEMS - Rev. 01/25/2023