


Instrucciones para el autodiagnóstico de COVID-19

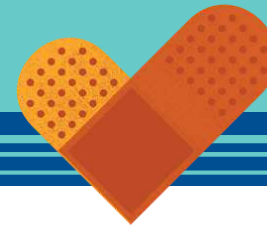


1 Colección de pruebas



Gire de forma circular. **Repita en la otra fosa nasal utilizando el mismo hisopo.**

2 Proceso de pruebas

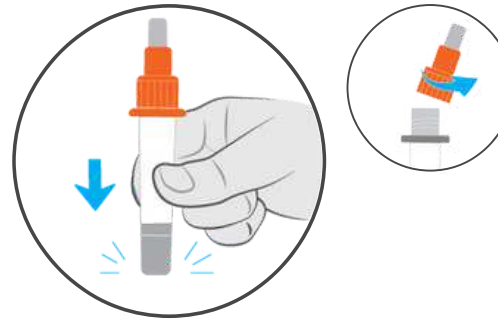


Golpee el tubo sobre la mesa.

3



Introduzca el hisopo en el tubo hasta que toque el fondo.

4

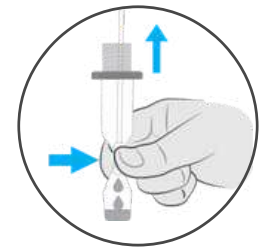


Exprima todo el líquido del hisopo. Retire el hisopo. Vuelva a colocar el hisopo en el paquete. Tírelo a la basura de forma segura.

5 Añadir la prueba



Abra la tarjeta de prueba de COVID-19. Añada **3 gotas** a la tarjeta de prueba. No toque el orificio.

6 Leer el resultado

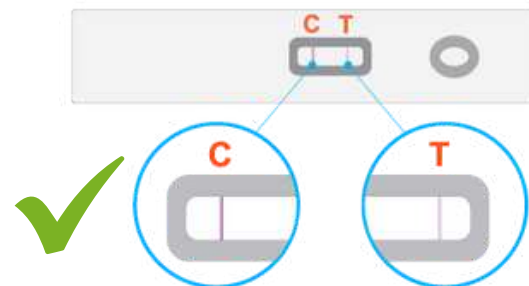

Si ve la **línea C** excelente trabajo. La prueba es válida. Busque tanto una línea C como una línea T. No lea los resultados **antes de 15 minutos** o **después de 30 minutos**.

7 Explicación del resultado de la prueba

El resultado **positivo** debe mostrar una **línea C** y una **línea T**.




El resultado **negativo** sólo mostrará una **línea C**.




Un resultado **no válido** sólo mostrará una **línea T** o **ninguna línea**.



COVID-19 Self-Test Instructions

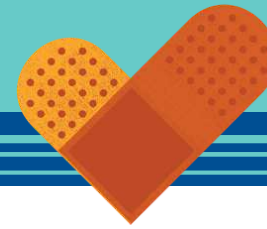


1 Collect Sample

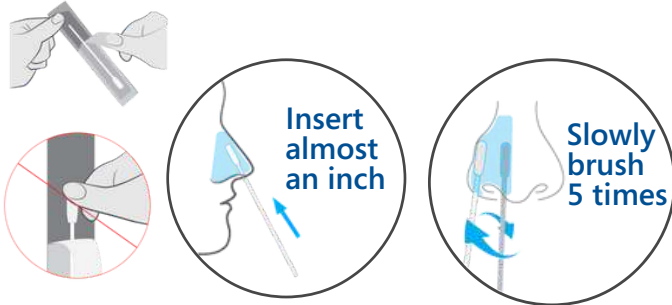


Brush in a circle. **Repeat on the other nostril using the same swab.**

2 Process Sample

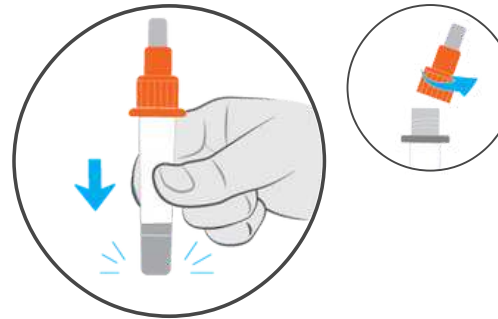


Tap the tube on the table.

3

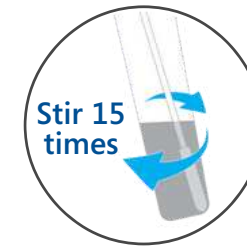


Insert the swab into the tube until it touches the bottom.

4

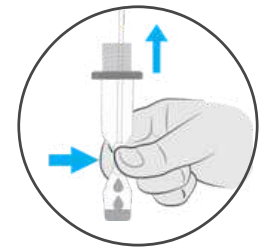

Squeeze all liquid out of the swab. Remove swab. Put swab back into the package. Safely throw away.


5 Add Sample

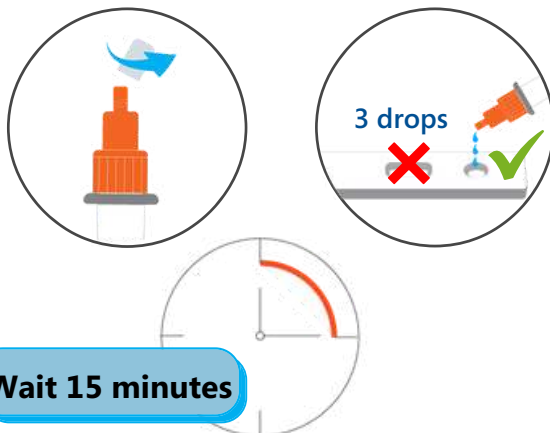

Wait 15 minutes

Open the COVID-19 test card. Add **3 drops** to the test card. Do not touch the hole.

6 Read Result

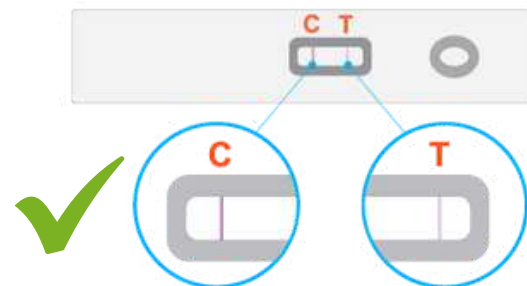

If you see a **C line** great job. The test is valid. Look for both a C and a T line. Do not read results **before 15 minutes** or **after 30 minutes**.

7 Test Result Explanation

Positive result must show a **C line** and a **T line**.



Negative result will only show a **C line**.



Invalid result will only show a **T line** or **no line**.

